

Link do produktu: <https://ultsk.previewsite.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-110110-n-p-57.html>


Lampa bakteriobójcza NBVE 110/110 N



Cena brutto	2 706,00 zł
Cena netto	2 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	NBVE 110/110 N

Opis produktu

Lampy bakteriobójcze przepływowe dwufunkcyjne z **dwoma zewnętrznymi promiennikami** to podwójna dawka dezynfekcji powietrza i powierzchni w Twoim gabinecie. Wybierając lampę bakteriobójczą NBVE zapewniasz sobie i swoim klientom bezpieczne i higieniczne środowisko, minimalizując ryzyko zakażeń i dbając o najwyższe standardy czystości mikrobiologicznej.

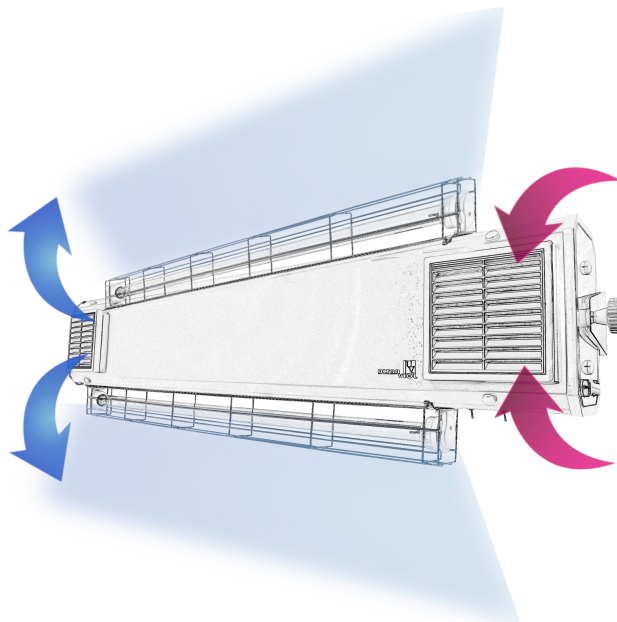

zasada działania

Działanie:

Lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna to urządzenie do dezynfekcji powietrza i powierzchni światłem UV-C. Funkcja I. to przepływowa dezynfekcja powietrza - w pełni bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin. Funkcja II. to bezpośrednia dezynfekcja powierzchni (i częściowo powietrza) zewnętrznymi promiennikami, która może odbywać się tylko podczas nieobecności ludzi i zwierząt. Obie funkcje mogą pracować niezależnie od siebie lub razem.

Wykonanie:

Standardowe wykonanie lamp bakteriobójczych serii NBVE to stal nierdzewna. Lampę bakteriobójczą możesz zamówić również w wersji białej (stal węglowa lakierowana proszkowo) w tej samej cenie. Obudowa lampy bakteriobójczej jest łatwa w czyszczeniu. Do czyszczenia obudowy ze stali nierdzewnej należy używać tylko preparatów do pielęgnacji stali szlachetnych, które nie zostawiają smug. Lakierowane powierzchnie obudowy należy zmywać gąbką nawilżoną wodą z powszechnie stosowanymi środkami myjącymi.

Wersja montażu:

Wersja N oznacza montaż naścienny. Przewód należy wpiąć do instalacji i wyprowadzić włącznik klawiszowy na ścianie lub wybrać opcję z pilotem zdalnego włączania. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności dwufunkcyjnej lampy bakteriobójczej, potrzeba oddzielnego zasilania dla obu funkcji (instalacja przynajmniej 4-żyłowa). Dzięki temu będzie można włączać jedną lub drugą funkcję niezależnie od siebie.



wersja standard



wersja biała



montaż naścienny

Akcesoria:

Podstawową wersję lampy bakteriobójczej można uzupełnić o 2 niezależne od siebie liczniki czasu pracy i pilot zdalnego włączania/wyłączania. Na etapie składania zamówienia można wybrać dowolną konfigurację:

- liczniki czasu pracy - wewnętrzne liczniki mechaniczne (L)
- pilot zdalnego włączania (RC)



liczniki czasu pracy L



pilot zdalnego włączania/wyłączania RC

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie: Standard , Biała

Wersja z licznikiem czasu pracy: Bez licznika czasu pracy , Licznik wewnętrzny NBVE (+ 147,60 zł)

Wersja z pilotem RC: Bez pilota RC , Z pilotem RC NBVE 2f. (+ 307,50 zł)

Dane techniczne

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 145 W
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- trwałość promiennika: 9000 h
- wydajność wentylatora: 199 m^3/h
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m^3
- zasięg działania lampy: 18-36 m^2
- klasa zabezpieczenia ppor.: I

-
- typ obudowy: IP 20
 - wymiary kopuły: 1125 x 130 x 355 mm
 - wymiary: 1190 x 145 x 355 mm
 - masa: 8,5 kg
 - przewód do wpięcia w instalację elektryczną (zakończony kostką)

Zalety produktu

- Wydajność dezynfekcji: Lampa bakteriobójcza wyposażona jest w cztery promienniki UV-C o mocy 55 W każdy, co zapewnia skuteczne usuwanie bakterii, wirusów, pleśni i grzybów
- Bezpieczeństwo użytkowania: Dzięki zamkniętej komorze dezynfekcyjnej promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz, co pozwala na bezpieczne użytkowanie funkcji przepływowej w obecności ludzi
- Łatwa obsługa: Lampa posiada pilot zdalnego sterowania oraz dwa niezależne liczniki czasu pracy dla obu funkcji, co ułatwia monitorowanie i zarządzanie procesem dezynfekcji.
- Wysoka jakość wykonania: Obudowa przepływowych lamp bakteriobójczych NBVE jest wykonana ze stali nierdzewnej lub stali węglowej lakierowanej na biało (wykonanie specjalne), co zapewnia trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.

Wideo

Lampy bakteriobójcze przepływowe NBVE - wideo poradniki

Prezentujemy serię wideo poradników, które objaśniają:

- do czego służy filtr w przepływowej lampie bakteriobójczej,
- jak wymienić filtr w lampie bakteriobójczej NBVE.

Nasze wideo poradniki są stworzone z myślą o lekarzach, pracownikach ochrony zdrowia oraz wszystkich innych osobach, które chcą oddychać powietrzem wolnym od wirusów, bakterii i grzybów.